



ІНСТРУКЦІЯ

з використанням вушних бирок для великої рогатої худоби, свиней, овець та кіз

Бирка вушна для великої рогатої худоби та свиней складається з двох частин – входної та порожнистої, що з'єднуються між собою за допомогою спеціального пристрою (аплікатора) безпосередньо на вусі тварин. Бирка для овець та кіз є суцільна пластина, що має замковий механізм, який складається з входної та порожнистої частини.

Для кріплення бирки на вухо тварини використовують тільки ті аплікатори, що постачаються в комплекті з бирками.

Прокол вуха тварини здійснюється входного частиного бирки, що встановлюється на металевий штир аплікатора.

Щоб прикріпити бирку на вухо тварини, потрібно:

- входну частину бирки надіти на металевий штир аплікатора обов'язково до утору (зверніть на це особливу увагу);

- порожнисту частину бирки вставити та закріпiti у фіксуючій частині аплікатора;

- вхідну частину піввесті відносно порожнистої, перевірити їх сумісність і в разі необхідності відцентрувати їх;

- зафіксувати голову тварини нерухомо на момент кріплення бирки;

- продезінфікувати конусну частину входної бирки та місце проколу вушної раковини дезінфікуючим розчином (за рекомендацією ветеринарів);

- прокол вуха здійснюється входною частиного бирки на межі між першого та середнього частинами вуха, посередині між двома повзловажними вушними венами (дивись малюнок);

- підвести аплікатор до місця прикріплення бирки і пробити вухо тварини з необхідним зусиллям, з'єднавши обидві частини бирки;

- обережно зняти аплікатор і звільнити тварину.

Mісце проколу



Увага: щоб уникнути зараження інфекції комахами елітку, ідентифікацію худоби потрібно проводити враніше або пізно вечеरі (когді прохолодно)

